



Badepose til både HD og PD, som holder helt tæt. Kan benyttes i både bruser og i bassin. Ideel løsning hvis man f.eks. skal på ferie.

Dette unikke produkt er skabt specifikt til at beskytte kateteret under aktiviteter, der involverer kontakt med vand. Den vandtætte lomme er testet, garanteret og nem at påføre fuldstændigt selvstændigt. Den tillader ikke kun, at kateteret er fuldstændigt isoleret og beskyttet under brusebad og bad, men også under svømning i pool eller havet. Dens runde, firkantede eller rektangulære form gør, at hele området af kateteret dækkes.

Posen er nem at påføre og kræver ikke hjælp fra en plejer, hvilket giver patienten fuldstændig selvstændighed i i håndteringen af deres daglige aktiviteter.

- Den vandtætte EXIT-POCKET WP® sikrer, at kateteret er fuldstændigt isoleret fra vand. Dette beskytter udgangsstedet mod risikoen for infektion uden at påvirke patientens livsstil.
- Enheden er nem at fjerne og efterlader ingen rester.
- Den vandtætte lomme tilbyder beskyttelse mod infektioner og tillader patientens behandling at fortsætte. Patienten er på den anden side ikke tvunget til at opgive aktiviteter, der involverer kontakt med vand og de produkter og stoffer, det indeholder.

Fordele:

- Hurtig og nem placering.
- Komfortabel pasform.
- Hjælper med at forbedre livskvaliteten for kateteriserede patienter.
- Nem og hurtig afmontering.

Fås i en lille (rund åbning) og stor (rektangulær åbning) størrelse.

Mål, lille: 22 x 11 cm (H/B), åbning: Ø5 cm

Mål, stor: 26 x 13 cm (H/B), åbning: 9 x 10 cm

Varenummer	Beskrivelse	Antal pr. æske
EM S2005H/WP	Badepose til bassin, lille, rund åbning	50 stk.
EM S2011H/WP	Badepose til bassin, stor, rektangulær åbning	50 stk.

Badeposer - til HD og PD

1. Placer kateterstudserne ind i hullet.
2. Fjern beskyttelsesfilmen fra hullet.
3. Placer den nederste del af det klæbende hul korresponderende med den nederste del af exit-site. Gennemfør fastgørelse fra bund til top, undgå rynker eller lufthuller.
4. Tryk de klæbende kanter med hånden for at gøre lommen fuldstændig klæbende til huden (grundlæggende for at sikre den vandtætte integritet af lommen).



Klasse I - ikke sterilt medicinsk udstyr - Single-use - holdbarhed: 3 år fra produktionsdato.